

## 抗原検査について

マイナビDANCE ALIVE HERO'S 2022 オフライン予選では参加者、スタッフ、キャストなど会場に入られる方は全て抗原検査を必須とします。  
イベント当日、会場入場前に検査を行います。

### <抗原検査キット>

新型コロナウイルスの抗原の質の検出を15分程度で調べることができる研究用の簡易検査キットです(金コロイド法)。使用方法は下記をご確認ください。

#### 使用方法

唾液からの  
検体での検査

①あらかじめ口の中をきれいにし、唾液を紙コップの中に入れる。

②検体処理液の入ったサンプルチューブの根元のキャップをねじ開ける。

③ストローで採取した唾液を吸わせる。

④ストローで採取した唾液を検体処理液の入ったチューブに入れる。

⑤サンプルチューブのキャップを戻し、泡立っていないように検体処理液と混ぜ合わせる。

⑥サンプルチューブ先端の透明キャップを戻し、検体処理液をテストカセットのSの印字のあるくぼみに3~4滴落とす。




判定の確認は必ず15分以内となります。20分以上経過した後の出現は判定に使用しないものとします。

### 15分後、結果判定

C+ T+	新型コロナウイルス抗原の存在を示します。	→	×
C+ T-	新型コロナウイルス抗原が検出されなかったことを示します。	→	○

※「C」に線が現れなかった場合は判定が無効です。  
新しい検査キットで再度検査してください。

※検体の量が適量でない場合や、正しい検体採取が行われてない場合は、判定結果がエラーになりますのでご注意ください。

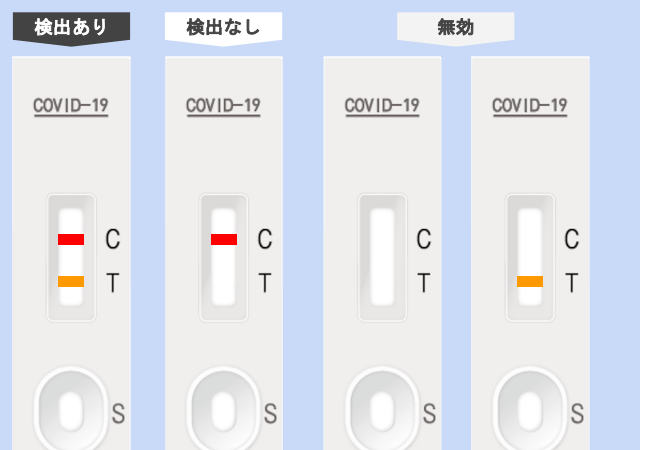

※本製品は20歳以上の方が対象となっておりますが、20歳未満の方も使用することが可能です。  
未成年者の使用の場合は保護者や周りの大人が立ち会いの上、体調に十分注意してご使用ください。